



## RELATÓRIO TÉCNICO

### COLAR CERVICAL DE ESPUMA CONFORTELL



**1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:** O colar cervical espuma é produzido em malha sintética ou algodão e espuma macia de alta densidade em PU, fecho com velcro.

**2. INDICAÇÃO:** Para traumatismos, torcicolos, artrites, artroses, somatizações e estabilizações da postura durante o sono.

**3. APRESENTAÇÃO:** Em malha sintética ou algodão com espuma de PU e velcro para fechamento.

**4. INSTRUÇÕES PARA O USO:**

- Verifique sempre se o tamanho é adequado.
- Posicione a curva central do colar sob o queixo.
- Envolver o pescoço com o colar, ajustando o fecho aderente na extremidade.

**5. CUIDADOS:** As condições e características do produto estarão asseguradas dentro do seu prazo de validade, desde que a sua embalagem original não esteja danificada, ou apresente sinais de violação. Nestes casos, não utilizar o produto, comunicando-se imediatamente com o fabricante. Mantenha fora do alcance das crianças.

**6. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO:** Manter o produto em local fresco e seco, evitando poeiras, temperaturas e umidades elevadas, inclusive durante o seu transporte.

**7. PRAZO DE VALIDADE:** 36 meses após a data de fabricação.

**PRODUTO DE USO ÚNICO. DESCARTAR APÓS O SEU USO. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

**FABRICAÇÃO: CONFORTELL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA ME.**

CNPJ: 47.507.520/0001-59 – Ind. Brasileira.  
Av. João Pignata, 141 – São Sebastião, CEP: 14169-220 – Sertãozinho – SP - Tel (16) 3524.2441- 2442. Resp. Téc: Enf Dra Vanir Versiani Magalhães Frizon CRT N° 217655

confortell@confortell.ind.br