



## RELATÓRIO TÉCNICO

### TALA IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EVA CONFORTELL



- 1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:** Confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada, coberta com E.V.A. (4mm) – colorido para identificar o seu tamanho. Pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a imobilização completa.
- 2. INDICAÇÃO:** Para imobilização provisória dos membros, superiores e inferiores “pernas e braços”, nos casos de suspeita de fraturas, traumatismos, torções e outras afecções traumáticas destes membros, em procedimentos de atendimento pré-hospitalar – “resgate”, na remoção e transporte do acidentado, evitando o agravamento da lesão.
- 3. APRESENTAÇÃO:** Conjunto com 5 Tamanhos (PP/P/M/G/GG).

**4. INSTRUÇÕES PARA O USO:** Nem sempre é possível o alinhamento de fraturas. Neste caso, moldar as talas, de acordo com a necessidade de aplicação em cada vítima. No caso de tala moldável em espuma, colocar a face da espuma mais espessa sobre a pele e não a parte da espécie mais fina;

**5. CUIDADOS:** As condições e características do produto estarão asseguradas dentro do seu prazo de validade, desde que a sua embalagem original não esteja danificada, ou apresente sinais de violação. Nestes casos, não utilizar o produto, comunicando-se imediatamente com o fabricante. Mantenha fora do alcance das crianças.

**6. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO:** Manter o produto em local fresco e seco, evitando poeiras, temperaturas e umidades elevadas, inclusive durante o seu transporte.

**7. PRAZO DE VALIDADE:** 36 meses após a data de fabricação, ou até que o produto esteja em bom estado de uso.

**REGISTRO MS. N° 80451210004**

**FABRICAÇÃO: CONFORTELL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA ME.**

CNPJ: 47.507.520/0001-59– Ind. Brasileira. Av. João Pignata, 141 – São Sebastião, CEP: 14169-220 – Sertãozinho – SP - Tel (16) 3524.2441-2442. Resp. Téc: Enf Dra Vanir Versiani Magalhães Frizon CRT N° 217655

confortell@confortell.ind.br