



RELATÓRIO TÉCNICO

TALA IMOBILIZAÇÃO ARAMADA ESPUMA CONFORTELL



TALA ARAMADA COM ESPUMA

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Confeccionada em tela aramada, maleável podendo ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para uma imobilização completa.

2. INDICAÇÃO:

Para imobilização provisória dos membros, superiores e inferiores “pernas e braços”, nos casos de suspeita de fraturas, traumatismos, torções e outras afecções traumáticas destes membros, em procedimentos de atendimento pré-hospitalar – “resgate”, na remoção e transporte do acidentado, evitando o agravamento da lesão.

Recomendações: O lado que deve ficar em contato com o usuário, é o lado da espuma com maior espessura. Armazenar em local limpo, seco e ao abrigo da luz. O amarelamento do produto é um fenômeno natural, porém não afeta suas características de qualidade, nem sua aplicação

3. APRESENTAÇÃO: Conjunto com 4 Tamanhos (PP/P/M/G/GG).

4. INSTRUÇÕES PARA O USO: Nem sempre é possível o alinhamento de fraturas. Neste caso, moldar as talas, de acordo com a necessidade de aplicação em cada vítima; No caso de tala moldável em espuma, colocar a face da espuma mais espessa sobre a pele e não a parte da espécie mais fina;

5. CUIDADOS: As condições e características do produto estarão asseguradas dentro do seu prazo de validade, desde que a sua embalagem original não esteja danificada, ou apresente sinais de violação. Nestes casos, não utilizar o produto, comunicando-se imediatamente com o fabricante. Mantenha fora do alcance das crianças.

6. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO: Manter o produto em local fresco e seco, evitando poeiras, temperaturas e umidades elevadas, inclusive durante o seu transporte.

7. PRAZO DE VALIDADE: 36 meses após a data de fabricação, ou até que o produto esteja em bom estado de uso.

REGISTRO MS. N° 80451210004

FABRICAÇÃO: CONFORTELL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA ME.

CNPJ: 47.507.520/0001-59– Ind. Brasileira. Av. João Pignata, 141 – São Sebastião, CEP: 14169-220 – Sertãozinho – SP - Tel (16) 3524.2441-2442. Resp. Téc: Enf Dra Vanir Versiani Magalhães Frizon CRT N° 217655

confortell@confortell.ind.br