



RELATÓRIO TÉCNICO

BANDAGEM TRIANGULAR CONFORTELL



- Possui fivela deslizante que permite a regulagem a altura adequada de cada usuário;
- Confeccionada em material resistente e lavável, tirante em nylon e fecho plástico;

4. INSTRUÇÕES PARA O USO: Posicione o braço sobre a tipóia deixando-o sempre em ângulo reto "L", proporcionando assim circulação sanguínea saudável, evitando dores e formigamentos no braço. Passe o cadarço por trás do pescoço e ajuste-o na fivela de encaixe. Para sua comodidade e proteção posicione a almofada atalhada na altura do pescoço. Tamanho disponíveis: P / M / G

5. CUIDADOS: As condições e características do produto estarão asseguradas dentro do seu prazo de validade, desde que a sua embalagem original não esteja danificada, ou apresente sinais de violação. Nestes casos, não utilizar o produto, comunicando-se imediatamente com o fabricante. Mantenha fora do alcance das crianças.

6. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO: Manter o produto em local fresco e seco, evitando poeiras, temperaturas e umidades elevadas, inclusive durante o seu transporte.

7. PRAZO DE VALIDADE: 36 meses após a data de fabricação, ou até que o produto esteja em bom estado de uso.

- 1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:** Tipóia simples para imobilização de braço em design universal. Desenvolvido em tecido leve e confortável de 45 g, este modelo se ajusta perfeitamente tanto ao braço direito quanto esquerdo.
- 2. INDICAÇÃO:** Utilizado para descanso e sustentação do membro superior em casos de fraturas, engessamentos, lesões no braço e antebraço, pós-operatório e sequelas de AVC.
- 3. APRESENTAÇÃO:**

- Tipóia descartável TNT com design universal;
- Leve e confortável (apenas 45g);
- Ajusta perfeitamente no braço direito ou esquerdo;

FABRICAÇÃO: CONFORTELL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA ME.

CNPJ: 47.507.520/0001-59 – Ind. Brasileira.
Av. João Pignata, 141 – São Sebastião, CEP: 14169-220 – Sertãozinho – SP - Tel (16) 3524.2441- 2442. Resp. Téc: Enf Dra Vanir Versiani Magalhães Frizon CRT N° 217655

confortell@confortell.ind.br